



**RESPIRONICS®**

Dispositivo de Insuflación/Exsuflación  
CoughAssist



INNOVADOR DISPOSITIVO  
QUE MEJORA O SUSTITUYE  
A LA TOS INEFICAZ

REDUCE LA INCIDENCIA  
DE INFECCIONES  
RESPIRATORIAS

FACIL DE UTILIZAR  
GRACIAS A SUS  
NIVELES AJUSTABLES

[www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)

Síguenos en:





Dispositivo de Insuflación/Exsuflación Coughassist Respironics Automático Mod. CA-3200 Manual Mod. CM-3200



## Dispositivo de Insuflación/Exsuflación CoughAssist

El **CoughAssist** ayuda a los Usuarios de forma no invasiva a limpiar las secreciones bronquiales cuando no pueden toser por sí mismos, como por ejemplo en caso de enfermedades neuromusculares o lesiones medulares.

El **CoughAssist** es una manera cómoda y segura de reducir el riesgo de lesiones en las vías aéreas y de complicaciones respiratorias.

El **CoughAssist** ayuda a los Usuarios mejorando o sustituyendo su capacidad natural para eliminar las secreciones bronquiales mediante la aplicación gradual de presión positiva en las vías respiratorias, seguida de un rápido cambio a presión negativa.

La inhalación lenta/exhalación rápida del flujo aéreo simula el proceso natural de la tos, al tiempo que evita los posibles problemas asociados con procedimientos más invasivos.

# RESPIRONICS®

### Especificaciones del Producto

**Voltaje de Entrada:** 100-120 V - 60 Hz

**Potencia de Entrada:** 300 VA

**Presión Positiva:** 5-60 cm. de H<sub>2</sub>O

**Presión Negativa:** 5-60 cm de H<sub>2</sub>O

**Medidor de Presión:** -70 a 0 a +70 cm. H<sub>2</sub>O (precisión de 6 cm. H<sub>2</sub>O)

**Peso:** 11kg. (Automático) 9.3 kg. (Manual)

**Medidas:** 29.2 cm. x 27.9 cm. x 41.9 cm.

**Tipo de Ventilador:** Ventilador centrífugo de dos etapas con motor universal de CA/CC

**Flujo de Inhalación Típico:** 3.3 lts./seg. mínimo (cuando se configura al mínimo; equivale a la exhalación cuando se configura al máximo)

**Flujo de Exhalación Típico:** 10 lts./seg. (el flujo actual depende de la presión configurada y de la resistencia de las vías respiratorias del Usuario)

**Tiempos de Inhalación, Exhalación y Pausas:**

**Automático:** 0-5 segs. **Manual:** Variable según el Usuario

**Garantía:** 2 años

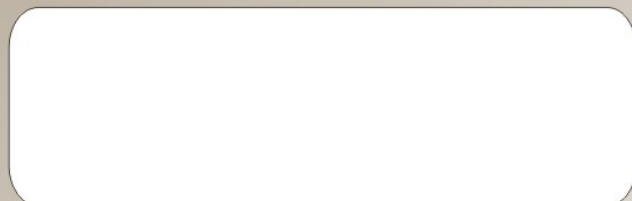


Ayuda a eliminar las secreciones de los pulmones





Se puede usar con una mascarilla facial, con boquilla o con un adaptador al tubo endotraqueal o la cánula de traqueotomía

Adquiera los Productos de Calidad ReActiv sólo con Nuestros Distribuidores Autorizados



[www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)

Síguenos en:  

**PRECAUCIÓN:** Estos productos sólo pueden ser vendidos bajo prescripción médica.