


Como colocarlas:

No-Varix® **Medias antiembolicas T.V.P.,** **NO** se deben colocar en las piernas de los pacientes como medias corrientes. Si las medias están recogidas en el estilo tipico de rosquilla, el efecto del material elástico se multiplica y hace difícil su postura, siguiendo estos pasos básicos, la media Antiembolica es facil de colocar.

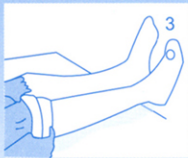

1. Introduzca la mano dentro de la media hasta el talón.
2. Gire la media al revés hasta el talón, no la enrolle como una media común. Coloque la media sobre el pie y el talón con cuidado. Dejando el tejido del talón en posición normal.
3. Continué deslizando la media hacia arriba, estire al máximo posible los tobillos y la pantorrilla.
4. Deslice la media hacia el centro del muslo para que él ángulo de expansión (tejido superior) quede situado en la Arteria Femoral.

Contraindicaciones

- * Insuficiencia arterial severa.
- * Infecciones de la piel.
- * Ulceración Activa.

Cuidado de la prenda

¡Importante!

- * Manipular la media sólo con la yema de los dedos,
- * Mantener un buen manicure
- * No usar joyas cuando se este colocando la media.
- * Escoja siempre la talla adecuada.

- * No exprimir
- * No utilizar blanqueador
- * No lavar en maquina
- * No planche
- * No secar en maquina



Manufacturado Por
Texpon S.A.
Medias y Calcetines medicados de compresión graduada
Bogotá D.C., Colombia
www.no-varix.com



Manufactura de pantimedias, medias, medias hasta la rodilla y calcetines medicados de compresión graduada para la prevención y tratamiento de las varices con el Certificado de Aprobación N° 172549 por BVQI

